



ÁCIDO FOSFÓRICO 37%

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Produto utilizado na preparação do tecido dental (dentina e esmalte) para a adesão de materiais restauradores.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

ÁGUA DESTILADA, SÍLICA NANOPARTICULADA, GLICEROL, AZUL CORANTE, POLIETILENOGLICOL, ÁCIDO FOSFÓRICO

PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS

GEL COM TONALIDADE AZULADA

PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

VISCOSIDADE: 1500 À 1800 CP.

DENSIDADE: 1,2 À 1,5 G/CM³.

PROPRIEDADES MICROBIOLÓGICAS

N.A

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

O ÁCIDO FOSFÓRICO É UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DO TECIDO DENTAL (DENTINA E ESMALTE) PARA ADESÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. QUANDO EM CONTATO COM OS TECIDOS DENTAIS REALIZA UM ATAQUE QUÍMICO, COM ISSO OCORRE UM AUMENTO NA ÁREA DE SUPERFÍCIE DO DENTE AUMENTANDO OS PONTOS DE ANCORAGEM MECÂNICA EM PROCESSO DE ADESÃO

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS:

USO PROFISSIONAL, NÃO UTILIZAR O PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE OU E A EMBALAGEM ESTIVER VIOLADA.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1) Preparar a região que será condicionada com o produto (limpar e secar);
- 2) Aplicar o condicionador ácido na superfície por no mínimo 20 segundos (alguns produtos adesivos possuem o tempo de aplicação definidos pelo fabricante);
- 3) Após a aplicação retirar o produto utilizando água;
- 4) Secar o local para iniciar o procedimento.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada. Proteger da incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C. Umidade até 75%.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

TRÊS SERINGA DE 3 G DE PRODUTO;
TRÊS PONTEIRAS APLICADORAS.

PRAZO DE VALIDADE:

2 ANOS.

REGISTRO DO PRODUTO:

ANVISA: MS: 80089629008



WWW.PREVEN.COM.BR



Garantindo Qualidade Para Você



Preven Ind. e Com. de Produtos Odontológicos EIRELI EPP
CNPJ: 01.739.415/0001-44 - AF: 800.896-2
Rua Paraná - nº 555 - Guapirama - PR
Responsável Técnico: Suellen Cristine Dos Santos - CRF: 30.804-PR
comercial.preven@hotmail.com
comercialx.preven@hotmail.com
www.preven.com.br



Garantindo Qualidade Para Você !