



## Instruções de Uso

**Nome Comercial:** DESSENSIBILIZANTE DENTAL

**Registro ANVISA:** 80089620027

**Fabricante:** PREVEN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

**CNPJ:** 01.739.415/0001-44

**Endereço:** Rua Paraná, n° 555, Centro, Centro, Guapirama/PR, CEP 86.465-000

**Responsável Técnica:** Suellen Cristine dos Santos - CRF PR – 30.804

### **Forma de Apresentação:**

DESENSIBILIZANTE DENTAL 2,0%

- Embalagem Flow Pack contendo 01 Seringa com 3g e 01 Ponteira Aplicadora.

DESENSIBILIZANTE DENTAL 0,2%

- Embalagem Flow Pack contendo 01 Seringa com 3g e 01 Ponteira Aplicadora.

### **Composição:**

#### **Composição química do DESSENSIBILIZANTE 2,0%.**

##### **Função / Componente / Classificação CAS / Percentual (em massa):**

Neutralizante / Hidróxido de Sódio / 1310-73-2 / 0,8 à 1,5%.

Espessante / Carbômero / 9003-01-4 / 2,5 à 3,5%.

Dessensibilizante e Remineralizante / Nitrato de potássio / 7757-79-1 / 2 à 4%.

Dessenbililizante e Remineralizante / Fluoreto de sódio / 7681-49-4 / 0,1 à 0,2,5%.

Estruturante / Glicerina Bidestilada / 56-81-5 / 20 à 45%.

Diluyente / Água deionizada / 7732-18-5 / 15 à 50%.

#### **Composição química do DESSENSIBILIZANTE 0,2%.**

##### **Função / Componente / Classificação CAS / Percentual (em massa):**

Neutralizante / Hidróxido de Sódio / 1310-73-2 / 0,8 à 1,5%.

Espessante / Carbômero 980 / 9003-01-4 / 2,5 à 3,5%.

Dessensibilizante e Remineralizante / Nitrato de potássio / 7757-79-1 / 0,1 à 0,3%.

Dessensibilizante e Remineralizante / Fluoreto de sódio / 7681-49-4 / 0,1 à 0,25%.

Estruturante / Glicerina Bidestilada / 56-81-5 / 20 à 45%.

Diluyente / Água deionizada / 7732-18-5 / 15 à 50%.

### **Indicação do Produto:**

O Dessensibilizante é indicado no tratamento de dentes com sensibilidades baixa, moderada e alta e foi desenvolvido para aliviar sensibilidade dental desencadeada por agentes térmicos e químicos. Também é indicado no tratamento de sensibilidade que pode ser causada pelo clareamento dental.





### **Precauções e Contraindicações:**

- Leia com atenção todas as informações contidas nas Instruções de Uso antes da utilização do produto. Guarde as Instruções de Uso para consulta até o consumo total do produto.
- Evite a ingestão proposital e excessiva do produto.
- Se ocorrer algum problema durante ou após a aplicação, comunique ao seu dentista.
- Produto não injetável. Não reutilize a embalagem.
- Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado.
- Para realizar o descarte do produto siga a legislação local.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Se um grande volume de produto for ingerido acidentalmente, procure ajuda médica.
- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

### **Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.**

### **Conservação e Armazenamento:**

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.

Proteger da incidência da luz solar direta.

Armazene o produto em temperaturas entre 5°C a 28°C.

