



Instruções de Uso

Nome Comercial: OBTURADOR PROVISÓRIO

Registro ANVISA: 80089629009

Fabricante: Preven Indústria E Comércio De Produtos Odontológicos - Eireli – Epp

CNPJ: 01.739.415/0001-44

Endereço: Rua Paraná, nº 555, Centro, Centro, Guapirama/PR, CEP 86.465-000

Responsável Técnica: Suellen Cristine dos Santos - CRF PR – 30.804

Forma de Apresentação: Obturador provisório, pote com 25g.

Composição:

Função	Componente	Classificação CAS	Percentual (em massa)
Modificador de viscosidade	Silicone Fluido Não Tóxico	63148-62-9	17% à 18%
Princípio ativo	Óxido de Zinco P.A.	1314-13-2	17% à 18%
Endurecedor	Sulfato de Cálcio	7778-18-9	64% à 65%

Parâmetros Organolépticos: pasta densa cinza

Parâmetros Físico-químicos:

viscosidade – Não Aplicável, densidade de 1,2 a 1,5g/cm³.

Parâmetros Biológicos: Não Aplicável

Produto Estéril: Não Aplicável

Indicação do Produto:

O produto é indicado para isolamento temporário de cavidades em tratamentos restauradores e endodônticos

Modo de Uso do produto:

- 1) Secar e isolar o local de aplicação;
- 2) Aplicar a quantidade do obturador necessária para selar a cavidade;





- 3) Retirar o isolamento e deixar o produto entrar em contato com o meio bucal;
- 4) Tempo de cura entre 15 e 30 minutos.

Precauções e Contra Indicações:

Não permitir que o produto entre em contato com os olhos e pele;
Caso entre em contato com a pele ou o olho, lavar com água em abundância e não esfregar (procurar um médico imediatamente);
Produto apenas para utilização profissional, manter longe de quem não possua treinamento adequado;
Manter longe das crianças;

Conservação e armazenamento:

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.
Proteger da incidência da luz solar direta e umidade.
Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C
Temperatura de transporte 60°C por 5 dias
Evitar contato com umidade.

