



Instruções de Uso

Nome Comercial: PASTA DE POLIMENTO

Registro ANVISA: 80089620025

Fabricante: Preven Indústria E Comércio De Produtos Odontológicos - Eireli – Epp

CNPJ: 01.739.415/0001-44

Endereço: Rua Paraná, nº 555, Centro, Centro, Guapirama/PR, CEP 86.465-000

Responsável Técnica: Suellen Cristine dos Santos - CRF PR – 30.804

Forma de Apresentação: Pasta de Polimento, 1seringa de 2g com Ponta Aplicadora.

Composição:

Função	Componente	Classificação CAS	Percentual (em massa)
Espessante	Carbômero 980	9003-01-4	3,5 à 4,5%
Estruturante	Glicerina Vegetal Bi-destilada	56-81-5	39 a 41%
Neutralizante	Hidróxido de Sódio	1310-73-2	1 à 3%
Polidor	Pó de diamante	7782-40-3	6 a 8%
Diluyente	Água deionizada	7732-18-5	45 à 47%
Flúor	Fluoreto de Sódio	7681-49-4	0,2 à 0,3%

Parâmetros Organolépticos: gel com coloração acinzentada

Parâmetros Físico-químicos: viscosidade de 1300 a 1500 cP densidade de 1,1 a 1,3 g/cm³.

Parâmetros Biológicos: Não Aplicável

Produto Estéril: Não Aplicável.

Indicação do Produto:

Pasta de Polimento é indicada para ser utilizada em conjunto com discos de feltro ou discos aveludados, o que potencializa sua ação no polimento e acabamento em superfícies de materiais restauradores em geral.





Precauções e Contraindicações:

- Utilize rotação baixa, exercendo pouca pressão sobre os discos de feltro, com toques intermitentes e em movimentos circulares, evitando-se assim o aquecimento excessivo da superfície dental.
- Durante a aplicação do produto é recomendada a utilização de óculos de segurança pelo profissional.
- Não utilizar em pacientes com qualquer sensibilidade aos componentes deste produto.

Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

Conservação e Armazenamento:

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada.
Proteger da incidência da luz solar direta.
Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C.

